

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte pokyny k používání, protože obsahuje důležité informace pro pacienta o používání výrobku.

Pokyny k používání si uschovejte, abyste si je mohli v případě potřeby znovu přečíst.

POPIS ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU Sante Intime

Lubrikační gel na bázi vody Sante Intime je vysoce kvalitní gel, který poskytuje dodatečnou hydrataci intimních partií při pohlavním styku. Přípravek lze použít i při análním styku.

SLOŽENÍ

Glycerol, kyselina citrónová, hydroxyethylcelulóza, fenylethanol, kaprylylglykol, čišťená voda.

OBECNÉ INFORMACE A INDIKACE

Zdravotnický prostředek Sante Intime se doporučuje používat pro:

- usnadnění pohlavního styku s obtížnou penetrací (např. v případě vaginální suchosti) také s použitím kondomu;
- zmírnění bolesti genitálií při pohlavním styku;
- zmírnění příznaků suchosti pochvy vedoucí ke tření a poškození epitelu intimních partií při pohlavním styku.
- podpora gynekologických vyšetření a měření vaginální teploty.

Přípravek lze použít i při análním styku.

Nešpiní spodní prádlo

Bez zápachu

Nehormonální přípravek

Hypoalergenní výrobek

Neobsahuje PEG, parabeny, detergenty včetně: SLS, SLES

MECHANISMUS PŮSOBENÍ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Při aplikaci výrobku Sante Intime při pohlavním styku nebo gynekologických vyšetřeních

se na zevním povrchu pohlavních orgánů vytvoří zvlhčující ochranný film, který přetrvává v místě aplikace, což výrazně snižuje tření a má vliv na snížení bolestivosti a zvýšení ochrany epitelu v případě suchosti sliznice.

Produkt zůstává v místě aplikace, což pomáhá předcházet mechanickému mikro poškození, oděrkám a podráždění epidermis a sliznic.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Poznámka: Před použitím gelu si důkladně umyjte ruce.

Gel lze používat podle potřeby, několikrát denně, pravidelně, bez věkového omezení.

Přípravek by měl být aplikován na oblast náchylnou k oděru, a to před pohlav-

ním stykem nebo vyšetřením.

Produkt lze použít v kontaktu s latexovými, polyuretanovými a polyisoprenovými kondomy.

Gel lze aplikovat přímo na kondom.

Pozor! Zdravotnický prostředek Sante Intime není antikoncepční prostředek a neobsahuje spermicid.

UPOZORNĚNÍ A KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte v případě přecitlivělosti (alergie) na některou ze složek přípravku. Pokud se během používání gelu objeví pocit pálení, svědění nebo zarudnutí, je třeba používání přípravku přerušit a pokud příznaky neustoupí, je třeba se poradit s lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte během těhotenství a kojení po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Gel může ovlivnit pohyblivost spermií a snížit schopnost otěhotnět.

V případě přetrvávající vaginální suchosti kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Nepoužívejte během menstruace.

Je třeba zabránit náhodnému kontaktu gelu s očními sliznicemi.

Nepoužívejte s lokálními anestetiky a jinými vaginálními přípravky, protože přípravek může snížit nebo oddálit jejich účinek.

Nepoužívejte, pokud uplynula doba použitelnosti.

Přípravek se používá na intimní partie. Nepolykejte!

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při pokojové teplotě (15-25 °C).

Uchovávejte v původním obalu.

Chraňte před světlem a zdroji tepla.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.

Dostupné balení výrobku:


Objem: 100ml

VÝROBCE:

LABORATOIRE L'IDEAL Parisien Sp. z o.o., Ulice Ogrodowa 8, 32-064 Niegoszowice

Distributor:

Pharma Activ Czech s.r.o., Fryštátská 238/47, 733 01 Karviná, info@pharmaactiv.cz

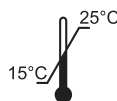

Informácie na obalu



Zdravotnický prostriedek

Nesterilní

Přečtěte si návod k použití.

Teplotní omezení, skladujte při 15°C - 25°C.

Nepoužívejte, pokud je lahvička poškozená!

Datum expirace

Číslo šarže

Výrobce

Datum vypracování pokynů k používání: Vydání 11 ze dne 15.02.2022.

Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte pokyny na používanie, keďže obsahujú dôležité informácie pre pacienta o používaní výrobku. Pokyny na používanie si uschovajte, aby ste si ich mohli v prípade potreby znova prečítať.

OPIS ZDRAVOTNÍCKEHO PROSTRIEDKU Sante Intime

Lubrikačný gél na báze vody Sante Intime je vysoko kvalitný gél, ktorý poskytuje dodatočnú hydratáciu intímnych partií pri pohlavnom styku. Prípravok je možné použiť aj pri análnom styku.

ZLOŽENIE

Glycerol, kyselina citrónová, hydroxyetylcelulóza, fenylethanol, kaprylylglykol, čistená voda.

OBEČNÉ INFORMÁCIE A INDIKÁCIA

Zdravotnícky prostriedok Sante Intime sa odporúča používať pre:

- ulahčenie pohlavného styku s ťažkou penetráciou (napr. v prípade vaginálnej suchosti) tiež s použitím kondómu;
- zmiernenie bolesti genitálií pri pohlavnom styku;
- zmiernenie príznakov suchosti pošvy vedúcej k treniu a poškodeniu epitelu
- intímnych partií pri pohlavnom styku.
- podpora gynekologických vyšetrení a meraní vaginálnej teploty.

Prípravok je možné použiť aj pri análnom styku.

Nešpiní spodnú bielizeň

Bez zápachu

Nehormonálny prípravok

Hypoalergénny výrobok

Neobsahuje PEG, parabény, detergenty vrátane: SLS, SLES

MECHANIZMUS PÔSOBENIA ZDRAVOTNÍCKEHO PROSTRIEDKU

Pri aplikácii výrobku Sante Intime pri pohlavnom styku alebo gynekologických vyšetreniach sa na vonkajšom povrchu pohlavných orgánov vytvorí zvlhčujúci ochranný film, ktorý pretrváva v mieste aplikácie, čo výrazne znižuje trenie a má vplyv na zníženie bolestivosti a zvýšenie ochrany epitelu v prípade suchosti sliznice.

Produkt zostáva v mieste aplikácie, čo pomáha predchádzať mechanickému mikro poškodeniu, oderom a podráždeniu epidermis a slizníc.

SPÔSOB POUŽITIA

Poznámka: Pred použitím géli si dôkladne umyte ruky.

Gél je možné používať podľa potreby, niekoľkokrát denne, pravidelne, bez vekového obmedzenia.

Prípravok by mal byť aplikovaný na oblasť náchylnú na odery, a to pred pohlavným stykom alebo vyšetrením.

Produkt je možné použiť v kontakte s latexovými, polyuretánovými a polyizo-

prenovými kondómami.

Gél je možné aplikovať priamo na kondóm.

Pozor! Zdravotnícky prostriedok Sante Intime nie je antikoncepcný prostriedok a neobsahuje spermicíd.

UPOZORNENIE A KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte v prípade precitlivenosti (alergie) na niektorú zo zložiek prípravku.

Ak sa počas používania gélu objaví pocit pálenia, svrbenia alebo začervenania, je potrebné používanie zdravotníckeho prostriedku prerušiť a pokiaľ príznaky neustúpia, je potrebné sa poradiť s lekárom alebo lekárnikom.

Užívajte počas tehotenstva a dojčenia po konzultácii s lekárom alebo lekárnikom.

Gél môže ovplyvniť pohyblivosť spermií a znížiť schopnosť otehotnieť.

V prípade pretrvávajúcej vaginálnej suchosti kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Nepoužívajte počas menštruácie.

Je potrebné zabrániť náhodnému kontaktu gélu s očnými sliznicami.

Nepoužívajte s lokálnymi anestetikami a inými vaginálnymi prípravkami, pretože prípravok môže znížiť alebo oddialiť ich účinok.

Nepoužívajte, ak uplynula doba použiteľnosti.

Prípravok sa používa na intímne partie. Neprehŕtajte!

SKLADOVANIE

Skladujte pri izbovej teplote (15-25 °C).

Uchovávajte v pôvodnom obalu.

Chráňte pred svetlom a zdrojom tepla.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obalu.

Nepoužívajte, pokiaľ je obal poškodený.

Dostupné balenie výrobku:


Objem: 100ml

VÝROBCA:

LABORATOIRE L'IDEAL Parisien Sp. z o.o., Ulice Ogrodowa 8, 32-064 Niegoszowice

Distribútor:

Pharma Activ Czech s.r.o., Fryštátská 238/47, 733 01 Karviná, info@pharmaactiv.cz

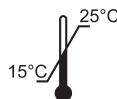

Informácie na obalu



**Zdravotnícky
prostriedok**

Nesterile

Prečítajte si návod na
použitie.

Teplotné obmedze-
nie, skladujte pri
15°C - 25°C.

Nepoužívajte,
pokiaľ je fľaštička
poškodená!

EXP

Číslo šarže

Výrobca